


GoTalk 20+

5 Tasten für Grundnachrichten — 12 Sekunden pro Feld
20 Tasten für Nachrichten — 8 Sekunden pro Feld



Gesamte Aufnahmezeit:
15 Minuten
(900 Sekunden)

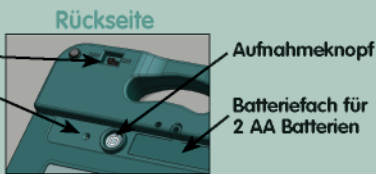

Attainment Company, Inc.
www.AttainmentCompany.com



Made in China.
Designed and Manufactured by
Reimer Electronics Inc., Naples, FL

GT-020 ISBN# 1-57861-550-X

Aufnahme

Schalten Sie den **GoTalk** ein, Sie hören einen Beep. Drücken Sie die Aufnahmetaste auf der Rückseite des GoTalk, die rote LED und eine grüne LED leuchten. Der Aufnahmemodus ist eingeschaltet. Die grüne LED zeigt Ihnen die aktive Ebene an. Betätigen Sie das gewünschte Nachrichtenfeld. Das Blinken der roten LED zeigt, dass der GoTalk nun aufnimmt. Sprechen Sie die Nachricht mit normaler Stimme in das Mikrofon.

Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie einfach ein beliebiges anderes Nachrichtenfeld. Der GoTalk bleibt im Aufnahmemodus, so dass Sie mit der Aufnahme weiterer Nachrichten fortfahren können.

Wenn Sie alle Nachrichten aufgenommen haben drücken Sie die Aufnahmetaste zum Verlassen des Aufnahmemodus.

Wiedergabe

Drücken Sie auf ein Tastenfeld, eine grüne LED blinkt und die Nachricht wird wiedergegeben.

Ebene wechseln und löschen

Zum Wechseln der Ebene drücken Sie den Ebenenumschalter unter den LEDs. Die blinkende grüne LED zeigt die aktuelle Ebene an. Betätigen Sie jetzt nochmals so oft den Ebenenumschalter bis die LED der gewünschten Ebene blinkt. Wechseln Sie das Deckblatt aus.

Zum Löschen einer kompletten Ebene drücken Sie die Aufnahmetaste auf der Rückseite des GoTalk. Drücken Sie den Ebenenumschalter so oft, bis die zu löschende Ebene aktiviert ist. Betätigen Sie mit einem Stift den Löschknopf (ERASE) auf der Rückseite des GoTalk. Die Ebene wird gelöscht.

Achtung: Diese Funktion löscht nicht die Grundnachrichten!

Sicherheitssperren

Es kann passieren, dass Anwender aus Versehen eine Nachricht löschen oder die Ebene wechseln. Zwei Sperren schützen davor.

So aktivieren Sie den Ebenenschutz: Drücken und halten Sie die Aufnahmetaste auf der Rückseite des GoTalk, die rote und eine grüne LED leuchten. Während Sie die Aufnahmetaste betätigt halten, drücken Sie einmal auf die Leiser-Taste. Die LEDs gehen aus, der Ebenenschutz ist aktiviert.

So aktivieren Sie die Aufnahmesperre: Drücken und halten Sie die Aufnahmetaste auf der Rückseite des GoTalk, die rote und eine grüne LED leuchten. Während Sie die Aufnahmetaste betätigt halten, drücken Sie einmal auf die Lauter-Taste. Die LEDs gehen aus, die Aufnahmesperre ist aktiviert.

Sicherheitssperren ausschalten: Schalten Sie den GoTalk aus. Schalten Sie den GoTalk jetzt mit gedrückter Aufnahme-Taste wieder ein. Die grünen LEDs leuchten nacheinander auf, der Beep ist zu hören und die Sperren sind ausgeschaltet. Beide Sperren werden immer gleichzeitig ausgeschaltet!