



Tingelhoff
Sanitätshaus




Anleitung: Trittschaum zur Anfertigung Ihrer individuellen ISI-Einlagen

Legen Sie den Trittschaum aufgeklappt rechts neben sich auf den Boden.

Setzen Sie Ihren Fuß vorsichtig auf eine Seite des Trittschaums, parallel zu Ihrem anderen Fuß.



Nehmen Sie den Fußabdruck im Stehen. Beachten Sie dabei die Hinweise auf den folgenden Seiten.

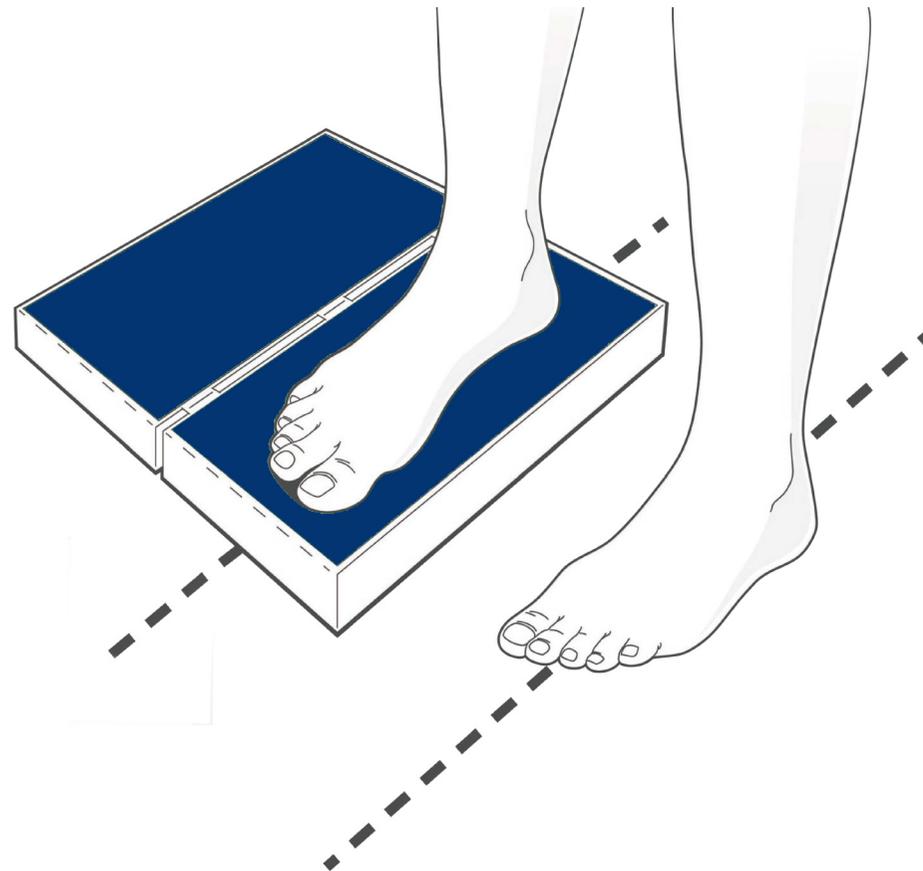

Tingelhoff
Sanitätshaus




Legen Sie den Trittschaum aufgeklappt rechts neben sich auf den Boden.

Setzen Sie Ihren Fuß vorsichtig auf eine Seite des Trittschaums, parallel zu Ihrem anderen Fuß.

Verlagern Sie Ihr Körpergewicht gleichmäßig auf beide Füße. Drücken Sie Ihren rechten Fuß vorsichtig in den Trittschaum.

Achten Sie dabei darauf, die Zehen nicht einzukrallen.

Ziehen Sie abschließend den Fuß **vorsichtig** wieder aus dem Trittschaum, um den entstandenen Abdruck nicht zu beschädigen.

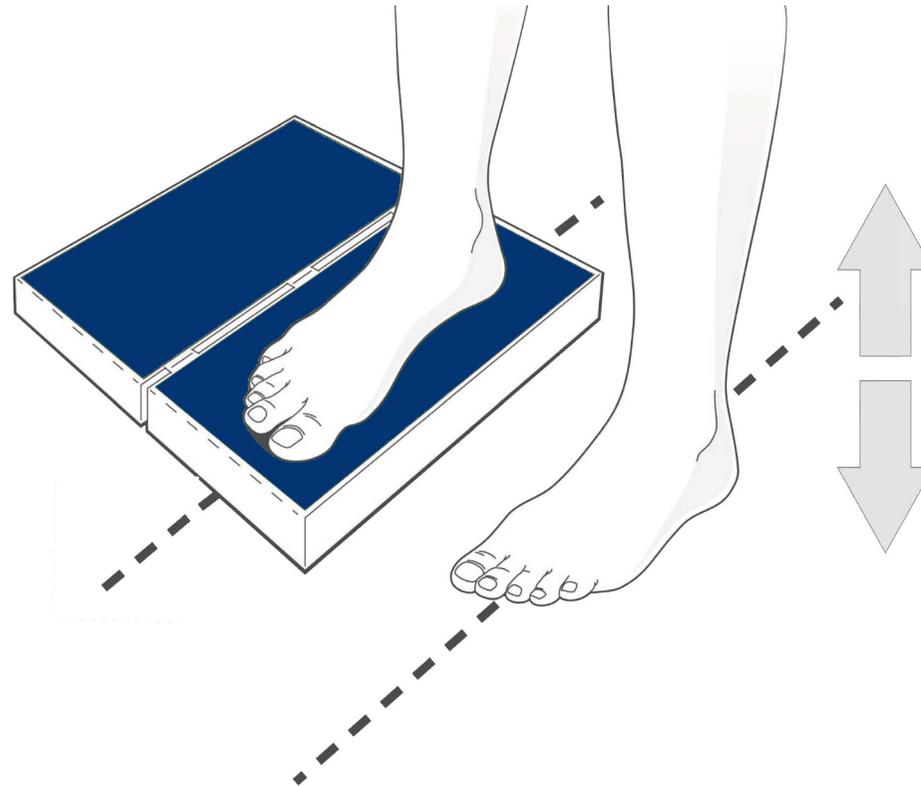


Tingelhoff
Sanitätshaus



Mit dem anderen Fuß und der zweiten Hälfte des Trittschaums wiederholen Sie die Schritte.



Nun haben Sie zwei saubere Fußabdrücke, die wir zur Fußanalyse und zur Anfertigung Ihrer individuellen ISI-Einlagen verwenden werden.

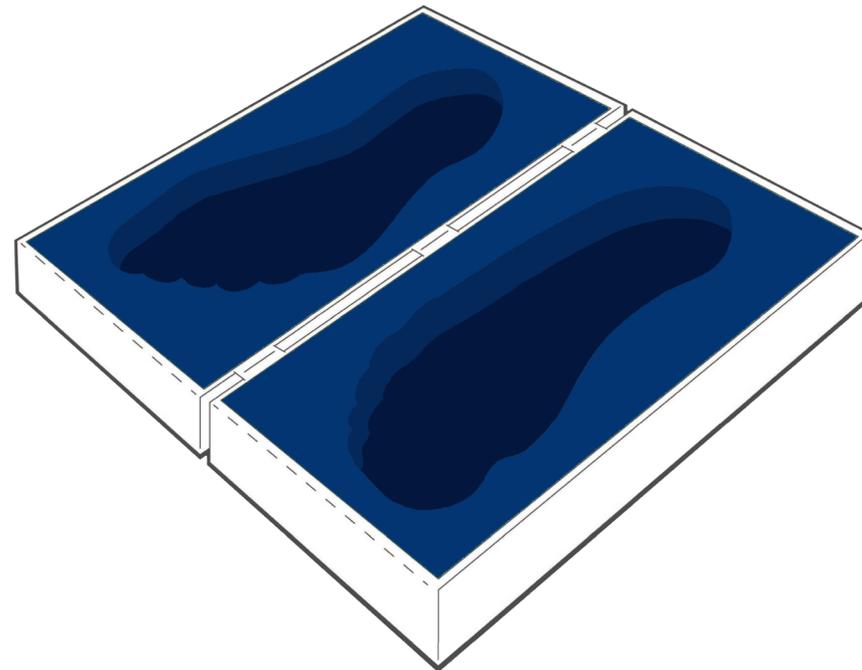


Abschließend füllen Sie bitte die Felder auf der Außenseite der Faltschachtel aus.

Markieren Sie bitte, ob Sie Diabetiker sind!

Falls Sie Diabetiker sind, verwenden wir gesonderte Materialien, da die Erkrankung meist mit verminderter Nervenfunktion (Sensibilität) in den Füßen verbunden ist.

Nutzen Sie den Umkarton für das Zurücksenden des Trittschaums. Beachten Sie bitte die Anweisungen auf dem beiliegenden **Retourenetikett**.

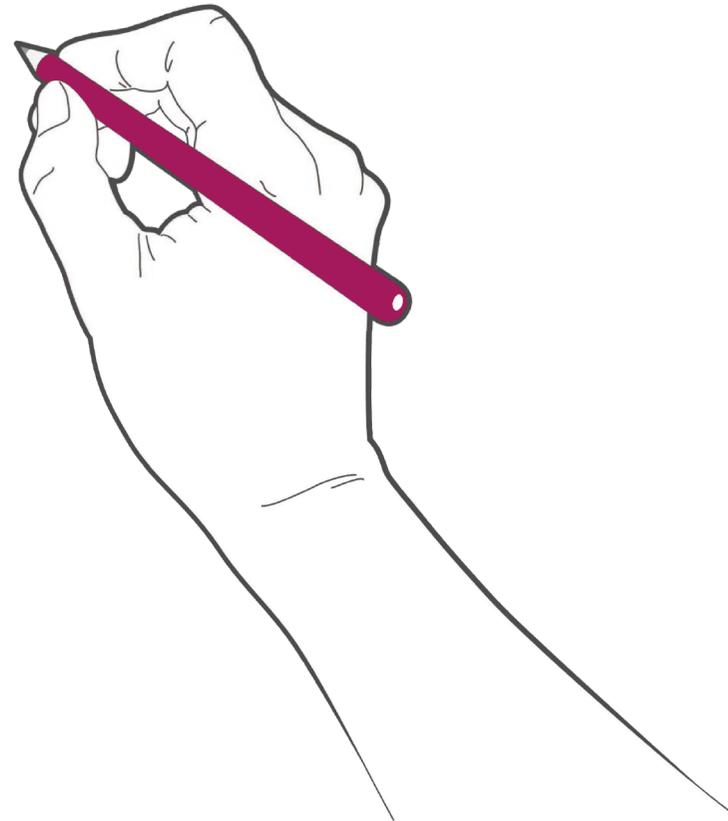



*Wir fertigen Ihre individuellen
ISI-Einlagen an und
schicken Ihnen diese zu!*